


NOTICE D'UTILISATION

Avant tout usage :

- Il est préconisé avant le premier port du masque de le laver en machine à 60 degrés.
- Il est important de respecter les gestes barrières et de se laver méticuleusement les mains au savon ou bien au gel hydroalcoolique.

MÉTHODE À ADOPTER

1

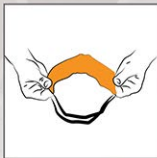

Ecarter les bords du masque tout en tenant des deux mains les élastiques entre le pouce et l'index

2



Positionner le masque sur le nez et la bouche en incluant le menton

3



Ecarter les élastiques afin de les faire passer au dessus de la tête

4



Procéder aux derniers ajustements afin d'assurer l'étanchéité du masque en s'adaptant bien au visage. Le nez, la bouche et le menton doivent être recouverts

UTILISATION ET RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN DU MASQUE

- Le changer toutes les 4 heures
- Le laver en machine à 60°C
- Le faire sécher
- Le repasser éventuellement à 150°C

